

fitoC MESORGANIC MEZO + LÉZER KEZELŐGÉP

Használati leírás



A tű nélküli mezoterápia (az eljárás elektroporációként is ismert) lényege, hogy egy speciális elektromos impulzus hatására a bőrszövetben található hidro-lipid rétegeken ún. „lyukakat” nyitunk, amin keresztül közvetlenül tudunk hatóanyagokat bejuttatni a bőrszövet mélyebb rétegeibe. Ez a hatás az alacsony feszültségű (10-60V) váltóáram 10Khz és 1MHz közötti frekvencia tartományában figyelhető meg. Az inger megszűntével a hidro-lipid réteg természetes állapotába áll vissza. Az eljárás anélkül zajlik le, hogy fájdalmas tűszúrásokat alkalmaznánk. Megjegyzés: az orvosi alkalmazásban az elektroporációt a sejtmembránt alkotó hidro-lipid réteg megnyitására és a sejtbbe történő hatóanyag bejuttatására használják.

A változó frekvenciájú, tű nélküli mezoterápiával a tűshöz hasonló érzetet lehet előidézni, ennek megfelelően a kezelés nem tartozik a relaxáló, nyugtató kezelések csoportjába. (az állandó frekvenciájú kezelésnek viszont van bőrnugtató hatása)

AZ 1-ES FOKOZAT – PULZÁLÓ LÁGY LÉZER

A készülék 1-es fokozata a pulzáló (villogónak is lehet nevezni) lézerkezelés, amelyet a mezo kezelés első lépésének javasoljuk. A lágy lézerterápia kis energiájú (nincs melegítő hatása) pulzáló lézersugárral történik, amely számos pozitív biológiai hatással bír és a 635nm-es hullámhossz révén képes mélyen a szövetekbe hatolni. (Össz. teljesítmény $6 \times 30 = 180 \text{mW}$) A pulzáló technológiának köszönhetően a hagyományos lézerkezelésekhez képest nagyobb intenzitással, hatékonyabban, de bőrkímélő módon fejt ki jótékony hatását. Teljesen fájdalom és fertőzésmentes. Jelentősen javítja a kezelt szövetek regenerációs képességét, a sejteket határoló sejthártyák működését. A rajtuk keresztül végbemenő anyag és energia forgalmat fokozza. A lágy lézerek sejtkárosodást nem okoznak, segítik a beteg sejtek eredeti funkciójának visszaállítását. Javítják a sejtekben az oxigénellátást, az erek újraképződését, az ellenanyag termelést, a vérkeringést. Alkalmazása megindítja a hámsérült bőrfelület gyógyulását.

A mezoterápiás kezelés során a bőr hatóanyag-felvételének fokozására alkalmazzuk, első, bevezető lépésként.

A lézeres kezelőfejet tartsuk a fejen lévő távtartó rudacskáknak megfelelő távolságra a bőrtől és arra merőlegesen. A távtartók hozzáérhetnek a bőrhöz, de kezelés után tisztítsuk meg fitoC Felület Tisztító 75% Alkoholos Oldattal. Kozmetikai terméket ebben a fokozatban ne használjunk! A kozmetikus az alkalmazás közben viselje a védőszemüveget (FC112LG Védőszemüveg) és a vendég is a megfelelő IPL kisméretű szemüveget., amit FC112LGV Védőszemüveg, Vendég Részére megnevezés alatt találsz az árjegyzékben.



A beállítás külön nem lehetséges, automatikusan előáll az energia szint, csak a kezelési időt lehet állítani.

A 2-ES FOKOZAT – ELŐKÉSZÍTŐ ÉS RELAXÁLÓ ÜZEMMÓD

A készülék 2-es fokozata, állandó 80Khz-es frekvenciával dolgozik. Ezt a fokozatot a tű nélküli mezoterápiás 3-as kezelés megelőző részeként, további előkészítő kezelésnek is használhatjuk, de önálló, teljes értékű kezelésként is alkalmazható.

A tű nélküli mezoterápiás 3-as kezelés kiegészítőjeként nagyban segíti a hatóanyagok felszívódását, bőrnyugtató hatása mellett relaxációs, bevezető, előkészítő masszázsnak is használható.

A mezoterápiás 2-es fokozat önálló kezelésként alkalmazva is rendelkezik mezoterápiás jellemzőkkel, de a hatásmechanizmusa a rádiófrekvenciás kezelésekkal is összevethető. Átmelegíti a szöveteket és ez nagyban segíti a hatóanyag bevitelt. (a kezelőfejet egy-egy terület felett kell tartani, mozgatás nélkül, így a melegedés hamarabb bekövetkezik) A létrehozott hőhatás révén az erek kitágulnak, a vér-és nyirokkeringés fokozódik. Ennek következményeként a bőrpoló hatóanyagok veszteség nélkül jutnak be a bőr mélyebb rétegeibe is.

Érzékenyebb bőrfelületeken a mezoterápiás 3 fokozat kiváló alternatívája kellemetlenségi panasz esetén.

A kezelést egy elektródányi területen kezdjük, a kezelőfejet mozgatás nélkül tartjuk rajta, megvárva, amíg a melegedés elkezdődik. A becsült bőrfelszíni hőmérséklet 43-45 fok, ami 2-3mm mélyen is jelentkezik. Utána mozgassuk új területekre. Elég nagy energia beállítás esetén jelentős izom összehúzódást is okoz, amelynek komoly lifting hatása van. Az energiaszint beállítása egyaránt lehetséges a baloldali két nyomógombbal, illetve a kiegészítőként vásárolható lábpedállal (FC112MLLP)

Alacsony fokozatban, bőrnyugtató, izomlazító hatása is van.

JAVASLAT: érdemes esetleg néhány percig a 3-as fokozatban melegíteni a fejet, és úgy visszakapcsolni 2-esre. Ez a módszer elősegíti a fej hamarabbi átmelegedését. A melegítő hatás csak a maximumhoz közeli beállításnál és nagyon lassú kezelőfej mozgatás esetén lép fel.

A vendégkartonra mindig jegyezd fel a beállítás erősségét. Gyakran előfordul, hogy a későbbi kezelése során vendégednek az azonos bőrérzethez erősebb beállításra van szükség. Ez teljesen természetes reakció, a vendég „hozzászokik” egy adott beállításhoz és később egy erősebb szinten érzi csak ugyan azt a hatást, hasonlóan a tűs mezo-hoz.

Javasolt beállítás: 30 és 60 között

A 3-AS FOKOZAT – REVITALIZÁLÓ ÜZEMMÓD

A készülék tű nélküli mezoterápiás fokozatának 3-as állásában is megvalósul a hatóanyag bevitele, de a továbbfejlesztett algoritmusnak köszönhetően a hagyományos mezoterápiás gépekhez viszonyítva ennél összetettebb folyamatok is lezajlanak.

Mivel a bőrben a víz-, zsír- és izomszövetet alkotó molekulák összetételükben és ebből adódóan méretükben is eltérnek egymástól, ezért eltérő stimulációra van szükségük. Mindez vonatkozik a kezelőanyagra is, aminek a hatóanyagai hasonlóan összetettek, így a kettő kombinációja végtelen variációjú stimulációs eljárást igényel.

A készülék mezoterápiás 3-as fokozata úgy lett kialakítva (a frekvencia folyamatosan változik 20 és 90Khz között, 30 lépésben), hogy a teljes spektrumot, a bőr sejtjeit és hatóanyag molekuláit egyaránt stimulálja, megsokszorozva a hatékonyságot.

Ebben a fokozatban a váltóárammal kisebb izomkontrakció is előidézhető, mintegy „tornáztatva” a szem és a száj körüli izmokat. (a szem körüli részen csak alacsony fokozaton javasoljuk az alkalmazást)

A vendégkartonra mindig jegyezd fel a beállítás erősségét. Gyakran előfordul, hogy a későbbi kezelése során vendégednek az azonos bőrérzethez erősebb beállításra van szükség. Ez teljesen természetes reakció, a vendég „hozzászokik” egy adott beállításhoz és később egy erősebb szinten érzi csak ugyan azt a hatást, hasonlóan a tűs mezo-hoz. Az energiaszint beállítása egyaránt lehetséges a baloldali két nyomógombbal, illetve a kiegészítőként vásárolható lábpedállal (FC112MLLP)

A kezelés az elektródát után tisztítsuk meg fitoC Felület Tisztító 75% Alkoholos Oldattal.

Javasolt beállítás: 10 és 30 között

A KÉSZÜLÉK ELŐNYEI

- nem invazív, de nagyon eredményes hatóanyag beviteli eljárás
- nem jár fájdalommal és megfelelő beállítás esetén csak minimális az áramérzet

- nagyon sokféle vizes oldatban lévő hatóanyag bevitel lehetséges, más eszközzel nem megvalósítható mennyiségben
- a hatóanyag bevitel mellett javítja a bőr működését, vér-és nyirokkeringését (Isd. bőrfelszíni melegedés) és izom „tornáztató” hatása is van.

HATÁSAI

A három kezelési típus egymás utáni következetes használata megvalósítja azt a maximális hatékonyságú bőrápolást, amire egy kozmetikai kezelés korunkban képes. Mivel hatásmechanizmusuk egymásra épül, elérhetjük velük a bőrápoló hatóanyagok bőrbe juttatását maximális hatékonysággal a kezelés 1-es fázisa alatt, és a hatóanyagok tökéletes beépülését a 2-es és 3-as fázis alkalmazásával.

JAVALLATAI

A különböző vizes alapú hatóanyagok különböző bőrállapotok kezelésére alkalmasak. A jó áramvezetéshez alapzselére van szükség, amely a fitoC esetében a Hóalga Mezo Alapzselé (háromféle hyaluronnal).

A hóalga kivonata megújítja és védi a sejteket az idő előtti öregedéstől a Klotho enzim aktiválásával, illetve azzal, hogy kevesebb energiát enged felhasználni a sejteknek (CR - calorie restriction).

A kezelés kozmetikai kategória, tehát nem igényel steril rendszert. (ennek ellenére a fitoC ampullák steril, gyógyszergyári körülmények között előállított hatóanyagok, a szérumok és a vivő zselé pedig természetesen megfelelnek a kozmetikai készítmények mikrobiológiai tisztasági követelményeinek).

- a bőr általános állapotának javítása (pl. zsíros vegyes bőr esetén is)
- ránckezelés
- megereszkedett petyhüdt bőr
- mezoterápiás regeneráló kúra részeként
- anyagcsere fokozás
- a korábban ismert eljárásoknál hatékonyabb hatóanyag bevitel minden bőrtípus és bőrállapot kezelésére (az ellenjavallatok kizárásával).

A JAVASOLT KEZELÉSI SORREND

0. Kontraindikációk kizárása. Fémékszerek eltávolítása.
A bőr letisztítása.
Biológia peeling (5-10perc) (pl. fitoC Anannász+Bio Papaya Enzimpeeling) – a peeling lemosása, tonizálás
A hatóanyag koktéll elkészítése, Hóalga Zselé előkészítése (lehet két külön tálkába). A készülék bekapcsolása.
1. Lézer (10 perc) – 1-es fokozat (hatóanyag és zselé nélkül).
- 2.A A kezelt felületre a hatóanyag (ampulla v. szérum) felvitele steril (tű nélküli) 3ml-es fecskendővel, majd átzselézése, néhány rövid masszázss mozdulattal. (A hatóanyagot, koktélt ill. szérumot és a vezető zselét is lehet fecskendőből adagolni).
- 2.B Mezo és Melegítés – Előkészítő (2.-es Relax) üzemmód (10 perc) – a jó kontaktot biztosító zselével és hatóanyagokkal – 2-es fokozat (esetleg előtte néhány percig a 3-as a kezelőfej átmelegedése miatt).
- 3.A A kezelt felületre a hatóanyag felvitele steril (tű nélküli) 3ml-es fecskendővel, majd átzselézése, néhány rövid masszázss mozdulattal. (A hatóanyagot, koktélt ill. szérumot és a vezető zselét is lehet fecskendőből adagolni).
- 3.B Mezo – Revitalizáló (3-as Revital) üzemmód (20-30perc) – a jó kontaktot biztosító zselével és hatóanyagokkal – 3-as fokozat.
- 4.A A kezelt felületre a hatóanyag felvitele steril (tű nélküli) 3ml-es fecskendővel, majd átzselézése, néhány rövid masszázss mozdulattal. (A hatóanyagot, koktélt ill. szérumot és a vezető zselét is lehet fecskendőből adagolni).
- 4.B A melegítő mezo fokozat – 2-es Relax üzemmód (2-3 perc) alacsonyabb értékű beállításával bőrnyugtató hatás érhető el. – 2-es fokozat.
5. Rövid masszázss, a fel nem szívódott hatóanyagok bedolgozása érdekében.
6. fitoC Bio Olajkomplex (Normál v. Könnyű állagú) felvitele, a vizes anyagok lezárásához és rövid, simító átmasszírozás.
7. Nappali bőrápolás, fényvédelem.
8. A kezelőgép elektródáinak tisztítása fitoC Felülettisztító 75% Alkoholos Oldattal

Az összesen felhasznált hatóanyag: ampullák kb. 3-6ml, Hóalga Mezo Alapzselé kb 5-8ml.

Az elektródákat mindig a kezelt felületre merőlegesen kell tartani. A hatóanyagot, hatóanyag koktélt vagy szérumot és a Hóalga Mezo Alap Zselét az elektródák mozgatása közben, a kezelés alatt is adagolhatod a 3ml-es fecskendőkből.

A kezeléseket két-három hetente érdemes végezni.

FIGYELEM: A lézerkezelés alatt a kezelő kozmetikusknál védőszemüveg használata kötelező! (Izd. fitoC árjegyzék FC112LG Lézer Védőszemüveg. A vendég részére alkalmazz pl. a szoláriumokban használt felcspitethető védőszemüveget, IPL védőszemüveget, amit FC112LGV Védőszemüveg, Vendég Részére megnevezés alatt találz az árjegyzékben.

A rendkívül hatásos fito'Meso Tú Nélküli Mezoterápiás Kezelést különálló kezelésként, kúraszerűen (két-három hetente), illetve egy másfél-két óras kezelésbe beépítve, a gépes hatóanyag bevitel lépésnél is lehet alkalmazni.

A kezelés során leggyakrabban alkalmazott fitoC hatóanyagok:

Alapzselé: Hóalga Mezo Alapzselé (háromféle hyaluronnal – kicsi, közepes és nagy mol súlyú)

Steril ampullák:

- AEC vitamin koktél
- Anti age complex
- B vitamin complex
- C vitamin
- DMAE
- Ginkgo
- Hyaluron (kismolekula méretű)
- Kollagén pyruvát
- Peptidek (pl. argirelin, leufazil, glutation)
- Organikus szilícium
- Rutin
- Tigrisfű (centella asiatica)

Szérumok (egy részük még fejlesztés alatt)

- AHA Gyümölcssav Komplex 20% (glikolsav és egyéb AH és BH savak)
- Anti Age Komplex
- Antioxidáns Komplex
- Bio Vadárvácska Anti-Akne Komplex
- Botox-like Bőrfeszítő
- B Vitamin Komplex
- C-vitamin Liposzómákban + Ferulic Sav
- Couperosis Komplex
- Depigmentációs Komplex
- Ferulic Sav
- Hegkezelő Komplex
- Hyaluron (kismolekula méretű)
- HydraBoost Hidratáló Komplex
- Kollagén
- Multivitamin Komplex
- Növényi Össejt Komplex
- 5 Peptid Komplex
- Panthenol Bőrnyugtató Komplex
- Q10
- Repair Komplex
- Vadcikória Bőrfeszítő

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE:

Csatlakoztassuk a lézer és a körkörös elektróda kezelőfejeket a hátlanon található csatlakozókhoz. A lézerfej négyponos, a mezo háromponos kimenettel rendelkezik, nem lehet összetéveszteni a csatlakozókat. A harmadik csatlakozó pont a kiegészítésként vásárolható lábpedálhoz lett kialakítva. Ennek alkalmazásával az energiaszint beállítása egyaránt lehetséges a baloldali két nyomógombbal, illetve a lábpedállal (FC112MLLP)

A csatlakozók
kezelőfejek




kialakítása kizárja a
felcserélését.

A Lámpedal segítségével egyszerűen tudod növelni vagy csökkenteni a beállított energia szintet, amire a kezelés során az egyes területek eltérő érzékenysége miatt lehet szükség.



A készülék be- és kikapcsolása a hátlapon található főkapcsolóval történik. Az előlapon található nyomógombok kezelése a kijelző felirataihoz igazodva, értelemszerűen történik.

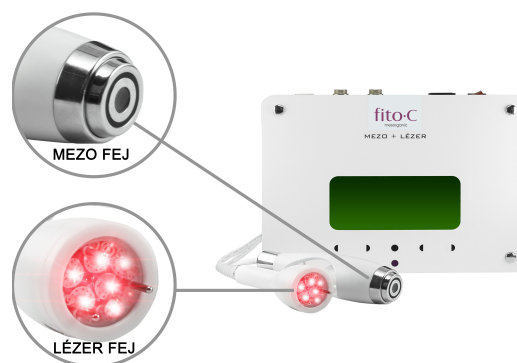

A **bal oldali két nyomógombbal** a kezelés intenzitását tudjuk szabályozni 64 lépésben. A készülék a kezelés energiájának mértékét grafikusán, a kijelző alján látható csík hosszával is jelzi. Ez az intenzitás a külön megvásárolható lámpedal segítségével is beállítható, folyamatosan, a kezelés közben. (ehhez semmilyen külön állításra nincs szükség, párhuzamosan működik a nyomógombos és lámpedálos szabályozás.)

A **középső nyomógombbal** a kezelés típusát tudjuk kiválasztani. (Selector 1, 2, 3. Lásd előző oldal). Üzem módot váltani csak a Pause (megállított) módban lehet.

A **jobb oldali két nyomógombbal** a kezelési idő hosszát tudjuk beállítani az automatikus leállításig. (max. 30 perc)

A **lila nyomógomb** a kezelés indítására és időleges megszakítására szolgál. A kezelést bármikor megszakíthatjuk és újraindíthatjuk az ismételt lenyomásával. (Start/Pause)

Bekapcsoláskor a teljesítmény automatikusan az egyes – alacsony - állásba kerül. A lézer üzemmódnál csak a kezelési időt tudjuk szabályozni, teljesítmény szabályozására nincs lehetőség (1-es üzemmód).

A kezelésekhöz szükséges teljesítmény eltérő a második és harmadik fokozat esetén. (Az 2-es üzemmód általában nagyobb, a 3-as üzemmód általában kisebb energiát igényel bőrtípustól függően).

Fontos: Az esetleges csípő érzés az elégtelen bőrkontaktus következménye. Ügyeljünk arra, hogy a kezelendő bőrfelületre kellő mennyiségű, könnyű zselé hatóanyagot (pl. fitoC Hóalga Mezo Alapzselé v. Mesorganic vagy lonto-UH zselék, szérumok) vigyünk fel a bőrfelületre és a kezelőfejet megfelelő erővel, lehetőleg a bőrre merőlegesen tartva szorítsuk a bőrfelületre. A még jobb kontaktus érdekében a kezelőfejre is rakhatunk zselét v. szérumot.

Ezen a videón látható, ahogy Loidl Kata a hatóanyagot és a szérumot alkalmazza a kezelés során: <https://www.youtube.com/watch?v=CPgukHojS68>

A Mezo Lézer kezelés oktató videóját itt tudod megnézni:
<http://www.st-beauty.co/f5681278/878745821112.mp4>

FIGYELEM: Kérünk, hogy a gépet ne helyezd erős elektromágneses térbe (pl. működő RF készülék, RF kezelőfej, mobiltelefon, mikrohullámú sütő, stb.), mert az, az elektronika meghibásodását okozhatja. Köszönjük!

ELLENJAVALLATOK

- Anyajegyek, szemölcsök egyéb bőrelváltozások, szövetszaporulat, egyéb bőrbetegségek
- Autoimmun betegségek
- Arcbénulás, arcideg zsába, arcüreg gyulladás
- Bizonyos kezelések után (pl. botox, hyaluron feltöltés, kémiai hámlasztás, stb.)
- Bőrrallergia, fémallergia
- Bőrgyulladás (dermatitis)
- Cukorbetegség
- Csak orvos által kezelhető aknés bőr
- Daganatos megbetegedések
- Egyes gyógyszerek szedése, kemoterápiás kezelés
- Ekcéma
- Epilepszia
- Esztétikai beavatkozások hat héten belül + konzultáció a kezelő orvossal szükséges
- Friss sebek, sérülések
- Friss tetoválás
- Fertőző bőrbetegségek
- Fogkezelések idején
- Gombás bőrfelület
- Gyermekeken (18 év alatt)
- Idegrendszeri rendellenességek
- Implantátum felett
- Izületi betegségek
- Ismeretlen eredetű fejfájás
- Keringési rendellenesség esetén
- Lázás állapot
- Pacemaker
- Pajzsmirigy felett
- Rozácea
- Sclerosis multiplex
- Súlyos atópiás bőr
- Szálbehúzásos arcfiatalító eljárás
- Szemek közvetlen környéke
- Szemgolyón
- Szívbetegség
- Várandóság alatt
- Vérkeringési zavarok
- Vércukorszint emelkedés
- Visszértágulatok, angióma

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérd meg vendéged, hogy a kezelés előtt vegye ki a fülbevalóit, vegye le nyakláncát, gyűrűit.
- A csatlakoztatás előtt győződj meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett értékkel (220-240V, AC-váltóáram).
- A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célra alkalmazd.
- A kezelés megkezdése előtt mindig teszteld a készüléket. Amennyiben rendellenes működést tapasztalsz, ne használd.
- A Meso + Lézer készüléket ne használd vízzel teli edény, mosdókagylóban, mosogatóban lévő víz felett, magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű körülmények között. Vízről tartsd távol a készüléket és csak váltóáramú hálózatra csatlakoztatsd.
- Ne használd a készüléket nedves kézzel, ne mártsd vízbe és ne engedd máshogy sem vízzel v. más folyadékkal érintkezni (pl.: fröcskölés).

- A készüléket ne fogd meg vizes kézzel.
- A készüléket tartsd távol kisgyermektől (használaton kívüli esetben is), a műanyag csomagolás sem gyermek számára készült játékszer, veszélyes lehet!
- Mindig ellenőrizd a csatlakozó kábel állapotát. Soha ne tekerd a kábelt a készülék köré. Sérült kábel esetén a készüléket többet ne használd.
- A készülék kábelét tartsd távol hőforrástól vagy nyílt lángtól.
- Amennyiben a Mezo + Lézer készülék nem működne vagy megsérült a kábel, a burkolatot ne bontsd meg, a készüléket ne próbáld megjavítani, hanem a termékkel keresd fel a vásárlás helyét.

Figyelem: Ha nem működik a készülék, ne kísérletez otthoni javítással, fordulj szakemberhez. Ez a termék nem tartalmaz házilagosan javítható elemeket.

- A fitoC Mezo + Lézer egy nagyon precízen kialakított professzionális szerkezet. Házilag javítható alkatrészeket nem tartalmaz. A burkolat megbontása veszélyes, a garancia elvesztését eredményezheti.
- A használat után a Mezo + Lézer készüléket mindig kapcsold ki. Ne hagyd csatlakoztatva felügyelet nélkül.

FIGYELEM: A műanyag csomagolóanyag veszélyes lehet. A fulladás elkerülése végett, tartsd távol a gyermekektől. A műanyag zacskó nem játék.

VIGYÁZAT – Ahogy a legtöbb elektromos berendezés esetében, az eszköz elektromos részei potenciális veszélyforrások, még kikapcsolt állapotban is.

Mindig áramtalanítsd az eszközt használat után. Fürdőszobai használat után húzd ki a áramforrásból, hogy elkerülje a víz jelenléte miatt fennálló veszélyhelyzeteket, még akkor is, ha az eszköz kikapcsolt állapotban van.

Amennyiben mégis vízbe esne, azonnal áramtalanítsd. Ne nyúlj utána a vízbe.

FIGYELEM: Ne használd fürdőkád, csap vagy más vizes helyen.

- Az eszközt csak rendeltetészerűen használd.
- Megfelelő áramforráshoz csatlakoztasd. Semmilyen körülmények között nem használható magasabb vagy alacsonyabb feszültség esetén.
- Ne használd hosszabbítóval vagy elosztóval az eszközt.
- Ne helyezd és ne tárold olyan helyen az eszközt, ahonnan leesve vagy lerántva fürdőkádba vagy csapba esne.
- Kiemelt védelem érdekében 30 mA-t meg nem haladó küszöbáramú maradékáram-működtetésű megszakító telepítése ajánlott.
- Az eszközt csak a fent leírtak szerint használd, hogy elkerüld a baleseteket, meghibásodásokat és sérüléseket.
- Használat előtt mindig vizsgáld meg az eszközt látható sérüléseket keresve.
- Ne használd az eszközt, ha sérült a csatlakozó vagy a kábel, ha nem működik megfelelően vagy leesett, megsérült vagy vízbe esett.
- Sérülés bekövetkezése után ne használd tovább és keresd meg a garanciajegyét.
- Ne hagyd felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva vagy áram alatt van.
- **GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ**
- Ne használd a terméket kiskorú gyereken.
- Olyan helyen tárold, ahol a gyermekek nem érhetik el.
- Használat után mindig kapcsold ki az eszközt áramtalanítás előtt.
- Az eszköz nem alkalmas szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlátozott, tapasztalatlan személy (akár felnőtt, akár gyermek) általi használatra kivéve, ha azt felügyelet mellett esetleg a személy biztonságáért felelős személy engedélyével teszi.
- Tartsd távol a kábelt meleg felületektől, a veszélyhelyzetek elkerülése végett.
- Ne helyezd erős elektromágneses sugárzó eszköz mellé (pl. mobiltelefon, mikrohullámú sütő, bekapcsolt RF készülék, stb.)
- Amikor csatlakoztatod vagy kihúzod a dugót, tartsd erősen a dugót, hogy megakadályozd a külső műanyag borítás leválását, áramütést vagy személyi sérülést.

- A készülék megfelel az EK 89/336EEC számú elektromágneses kompatibilitásról és az EK 73/23EEC elektromos háztartási készülékekre vonatkozó előírásnak, valamint az EK 93/68 rendeletnek is.

A fitoC MEZO + LÉZER TISZTÍTÁSA

- A használat után mindig húzd ki a hálózati csatlakozóból a készüléket. Időnként nedves ruhával tisztítsd le a borítást.
- A lézer és a mezo kezelőfej elektródájának tisztításához alkoholos oldat (fitoC Felület Tisztító 75% Alkoholos Oldat) és papírtörölő ajánlott.
- Újbóli használat előtt mindig ellenőrizd, hogy teljesen száraz-e a készülék.

TÁROLÁS

A használat idő után húzd ki a csatlakozó dugóját a fali konnektorból. A kábeleket ne csavard a készülék köré.

A készüléket száraz helyen, szobahőmérsékleten tárold.

GARANCIA

- A számlán szereplő vásárlási naptól számított EGY (1) évig adunk garanciát termékünkre.
- Ha a garanciaidő alatt bármilyen problémád adódik a készülékkel, - amely valóban a termék hibája (anyaga vagy a gyári összeszerelés következménye) - akkor a kár mértékének megfelelően vagy megjavítjuk a készüléket, vagy kicseréljük a hibás alkatrészt vagy egy új és hibátlan termékkel pótoljuk az előzőt.
- A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a meghibásodás a helytelen használat következménye (helytelen feszültség vagy nem megfelelő konnektor használat, törés, stb.).
- Nem érvényes a garancia azokban az esetekben sem, amikor a kár hatása jelentéktelen, vagy ha a készülék megfelelő módon működik. A garancia megszűnik, ha nem hivatalos szerviz szakembere végez javítást a terméken. A garancia csak akkor érvényes, ha a törvény által megkövetelt módon a garanciaártyán megtalálható a vásárlás dátuma és az eladó cég pecsétje (a garanciajegyet a számla is helyettesítheti).
- Kérünk, hogy ne szedd szét a készüléket, mert ez a garancia megszűnését vonja maga után.
- Garanciánk a garanciaidő alatti többszöri javításra is kiterjed.
- Garanciaigény esetén keresd fel a hivatalos fitoC Mezo + Lézer kereskedőt a hibás készülékkel és a hozzá tartozó garancia kártyával.
- A javítás idejére cserekészüléket biztosítunk (amennyiben lehetséges).

FORGALMAZÓ

A fitoC MESORGANIC Mezo + Lézer Készülékeket Magyarországon forgalmazza:

www.fito-c-beauty.co

ST Beauty Kft.

1147. Bp. Ilosvai Selymes u. 5.

www.st-beauty.co

info@st-beauty.co

Webáruház: www.st-beauty-shop.co

MŰSZAKI ADATOK

Típus: **FC112ML6**

Frekvencia (Hz): **50/60Hz**

Teljesítmény: **10W**

Lézer diódák: **6db, 30mW, összesen 180mW, 150mA max áramfelv., max 6fok széttartás**

Kimenő feszültség: **0-60Vpp**

Feszültség: **Europe 220-240 VAC**

Csatlakozó fajtája: **C (3, 4 és 6 tűs európai szabvány)**

Tömeg: **1480g**

Gyártatja és Forgalmazza:

ST Beauty Kft. www.st-beauty.co / 1027. Budapest, Bem J. u. 9. Magyarország

Származási ország: a ház és az elektródák Kínában készültek, a házon és a kezelőfejekben belüli elektronika, az előlap és a lézer fej elektronikája Magyarországon.

Ez a termék megfelel a 2004/108/EC (elektromágnesesség) és a 2006/95/EC (alacsony feszültség) előírásoknak.