

GUINOT

INSTITUT • PARIS

**AZ ÚJ
HYDRADERMIE
KEZELÉS
KETTŐS
IONIZÁCIÓVAL**





HYDRADERMIE
**Még hatásosabb, mint
valaha**

**A kezelés „Kettős
Ionizációval”**



**IONIZÁCIÓ
és
HYDRADERMIE**


**Az aktív hatóanyagok még jobb
behatolása a bőrbe**

**MÉLYEBB
GYORSABB**

MEGERŐSÍTETT HATÁSOSság

**Több, mint negyven év óta a Guinot
vezető eredményeket ért el ezzel a
kezeléssel szerte a világon a Guinot
szalonokban**


EGYSZERÜ IONIZÁCIÓ

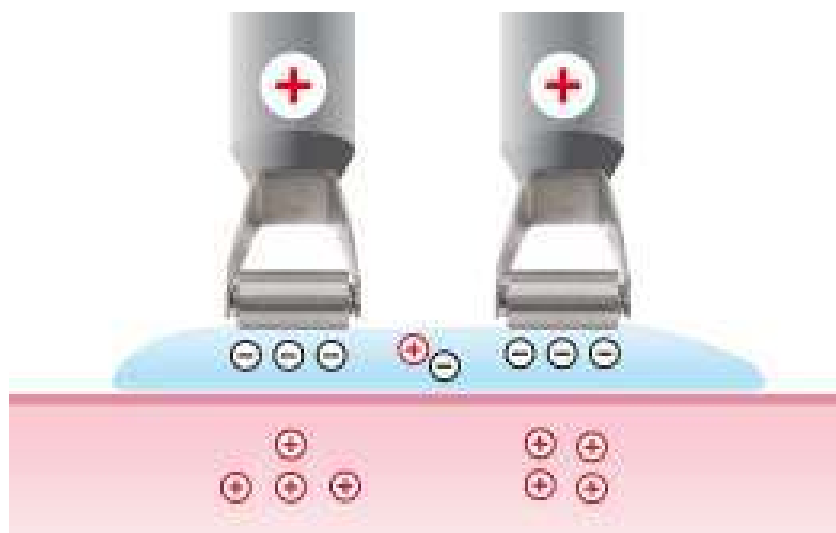

A vendég a negatív elektródát fogja

Egyedül a POZITÍV IONOK hatoltak be

„KETTŐS IONIZÁCIÓ”

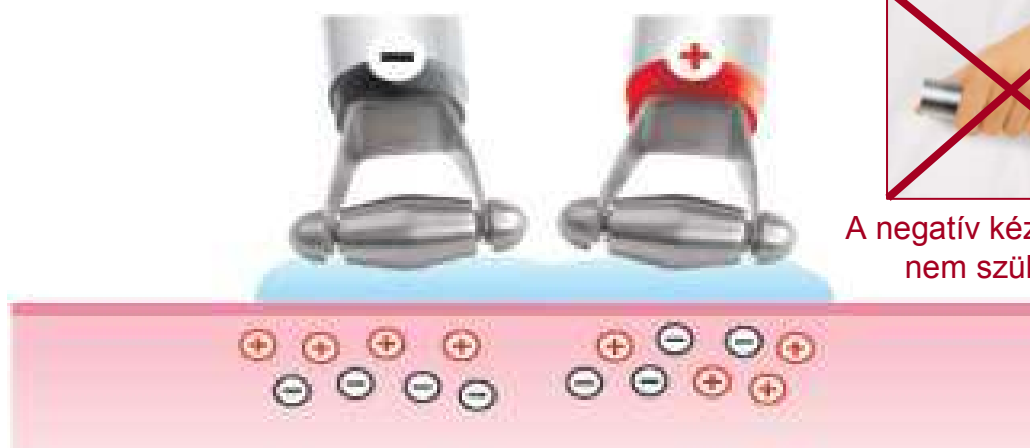

A negatív kézi elektróda nem szükséges

A POZITÍV IONOK behatolása egyidejűleg a NEGATÍV IONOK behatolásával dupla hatású bőrkezelést eredményez

„KETTÖS IONIZÁCIÓ”

Stimulálja az aktív hatóanyagok gyors és a bőr mély rétegeibe való hatolását

A negatív polaritású anyagok behatolását is elősegíti.

A „KETTÖS IONIZÁCIÓ”

Megsokszorozza a szépségápolási kezelés erejét



ÚJ HATÓANYAGOK NEGATÍV
POLARITÁSSAL

Hyaluron Sav

Gyümölcs Savak

Aminosavak

Szalicil Sav

C Vitamin


Tejsav

Biopeptidek




F Vitamin

„KETTŐS IONIZÁCIÓ”

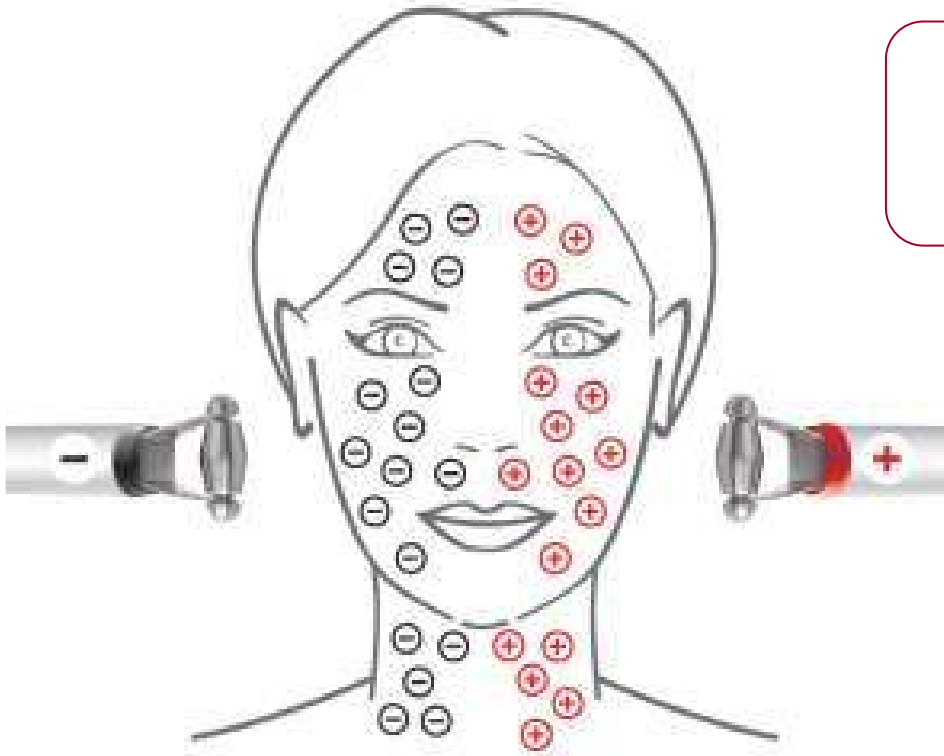



**Első elektróda
görgetése**
5 perc

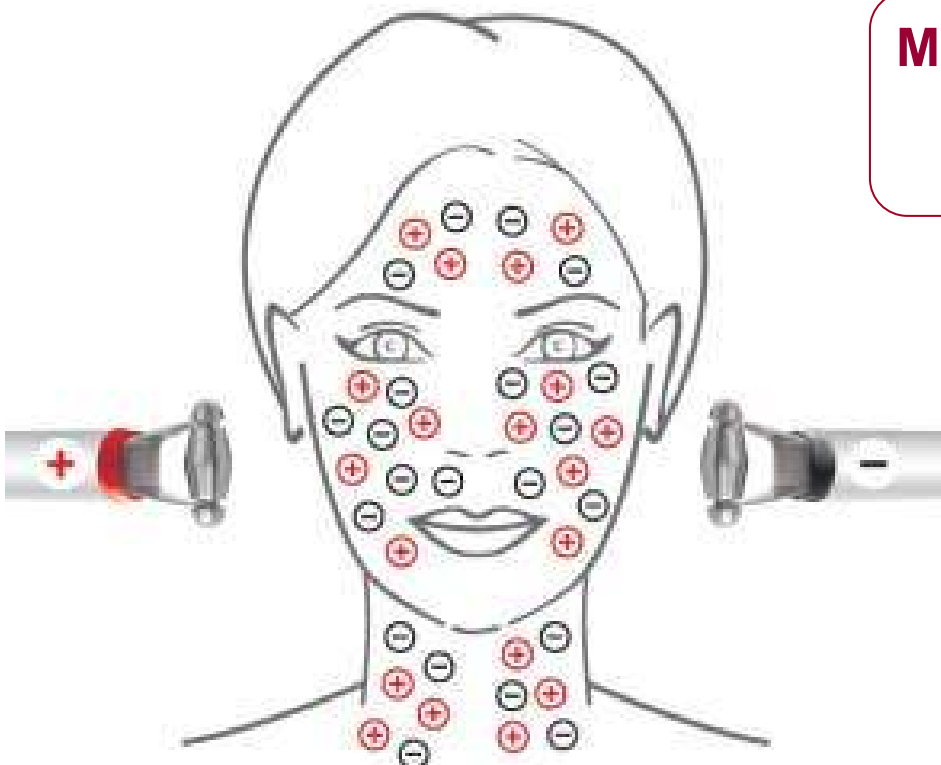

**Második elektróda
görgetése**
5 perc

„KETTŐS IONIZÁCIÓ”

Sokkal precízebb, teljesebb és egyszerűbb

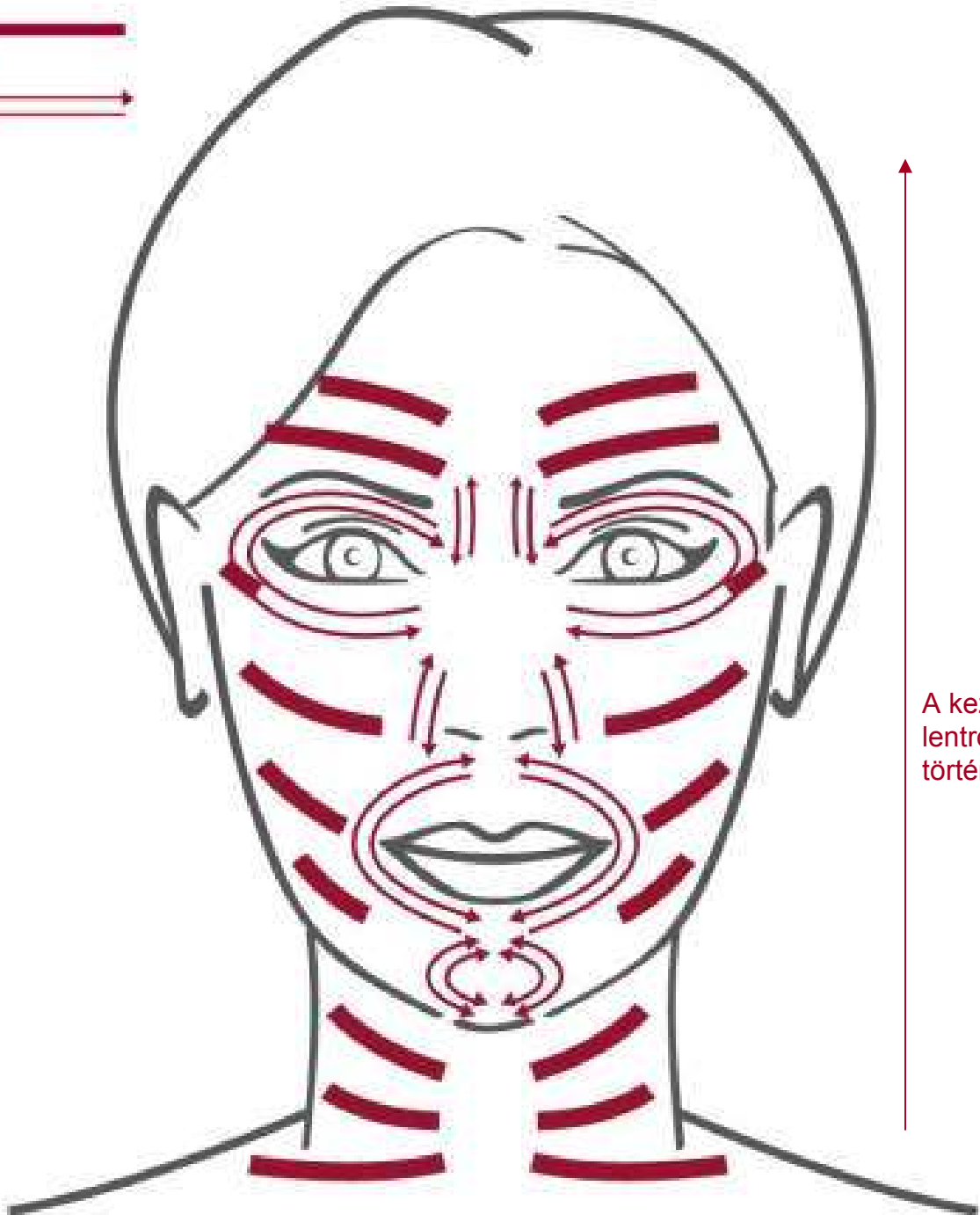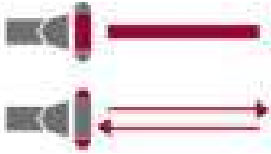


A kezelés
lentől felfelé
történik

**Teljes kezelés
ARC, SZEMEK és NYAK**

„KETTŐS IONIZÁCIÓ” Új kezelési elektródák

A görgőkkel az arc lapos területein végezzük az iontoforizálást

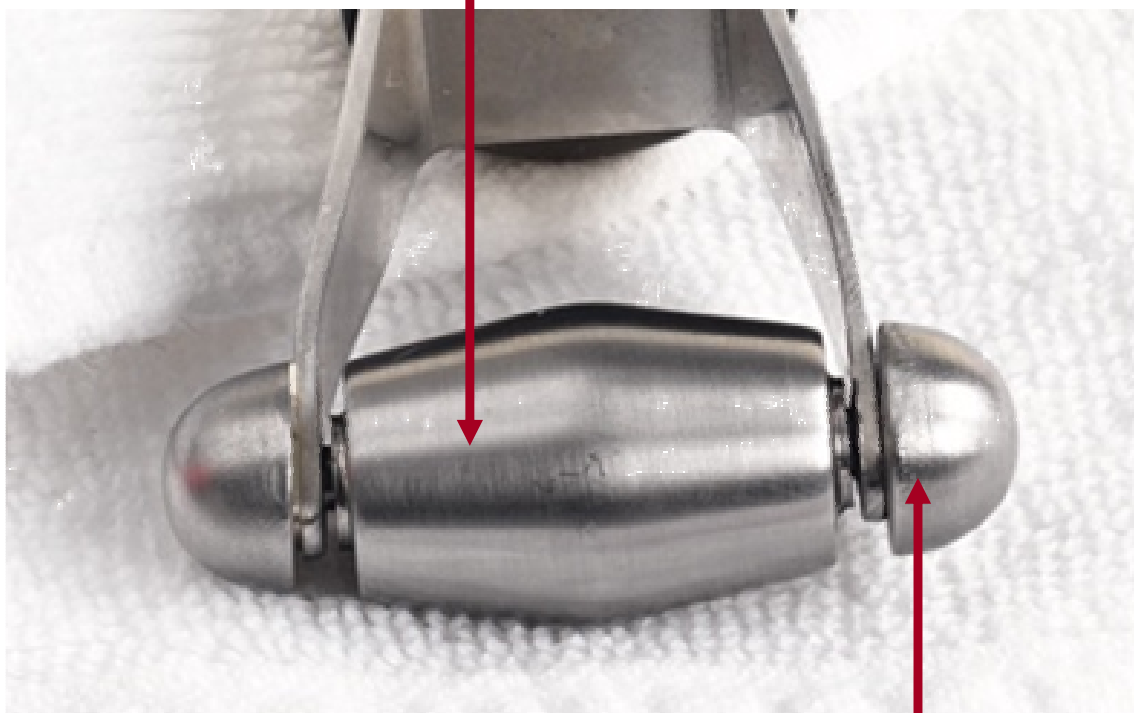

A lekerekített végekkel pedig az állon, a szem és száj körül valamint a nevető ráncokon végezzük az iontoforizálást

„KETTŐS IONIZÁLÁS”

A negatív elektróda többé nem szükséges

VALÓDI IDŐMEGTAKARÍTÁS

A KOZMETIKUS SZÁMÁRA

Nem szükséges többé időt tölteni a negatív elektróda előkészítésével, benedvesíteni majd a vendég kezébe adni.



MÉG NAGYOBB KÉNYELMET BIZTOSÍT A VENDÉG SZÁMÁRA

Az ionizációs áram az arcra fókuszál és nem megy át a testen.

„KETTŐS IONIZÁCIÓ”

Szérum gélek minden szépségápolási célnak



Tápláló Szérum Gél



Víz- és Zsírh. Bőr

Hidratáló Szérum Gél



Vízhiányos Bőr

Ránctalanító Szérum Gél



Érett Bőr

Age Logic Szérum



Érett Bőr

Tisztító Szérum Gél



Zsíros Bőr

Nyugtató Szérum Gél



Érzékeny Bőr

Halványító Szérum Gél



Pigmentfoltos Bőr

Ránctalanító Szérum Gél
Szemre



Specifikus

Nyak és Mell Feszítő Szérum
Gél



Területek

KEZELÉS MENETE

ÚJ



A kezelés aktivátorainak „Kettős Ionizációja”



Vio

Felébreszti a bőrt azáltal, hogy stimulálja a bőr sejtjeinek oxigenizációját és a vérkeringést.



Relaxáló Arcszobrászat

Tökéletes relaxálás a vendég számára a kozmetikus szakértő kezei alatt. Az arc vonalai kisimulnak, a bőr tündöklővé válik.

ÚJ

50 perc szépségápolási protokoll

Egy órás kabin kezelés

KEZELÉS MENETE

Egy óra a kabinban

1



BÖR ELÖKÉSZÍTÉSE

10'

Szemfesték lemosása a Hydra Demaquillant Yeux szemletisztítóval.
Smink eltávolítása a bőrtípusnak megfelelő tejjel, majd lemosás.
Exfoliating Makeup Remover alkalmazása körkörös mozdulatokkal.
Lemosás és tonik alkalmazása, felszárítása.

2



„KETTÖS IONIZÁCIÓ”

10'

Specifikus szérum gél alkalmazása a szem környékére.
Nyak és mell szérum alkalmazása.
Az arc gélek kiválasztása és alkalmazása a szépségápolási célnak megfelelően.
Elektródák görgetése az arcon felfelé irányuló mozdulatokkal, majd megfordítjuk a pozíciójukat a második görgetéshez.

3



OXIGÉN KEZELÉS

5'

OZ2 Oxygenator felvitele.
Vió alkalmazása a bőrön.
Megmaradt szérum eltávolítása spatulával, lemosás, tonik alkalmazása, majd felszárítás.

SZÉRUMOK FELVITELE

5'

Sérum Lifting Yeux (1/4 ampulla) alkalmazása és bedolgozása a szem környékére.
Longue Vie Cou Serum alkalmazása és bedolgozása a nyakra és a dekoltázsra.
(1/2 ampulla)

4



MASSZÁZS

10'

A Sérum Crème De Modellage Massage alkalmazásával szobrászati arc, nyak és dekoltázs masszázss.
Lemosás.

MASZK ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS

10'

Szépségápolási célnak megfelelő maszk alkalmazása.
Lemosás, tonizálás és felszárítás.
Bőr szükségleteinek megfelelő termék alkalmazása.
Befejező szépségápolás a Masters Colors termékekkel.

HYDRADERMIE LIFT

Ma



ÚJ

HYDRADERMIE LIFT



A nagyobb felületi kontaktus megnöveli az izomstimulációt

A JOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN

Javasolt Szérum Gél: Age Logic




ÚJ


HYDRADERM LIFT KÉSZÜLÉK



„Kettős Ionizáció”

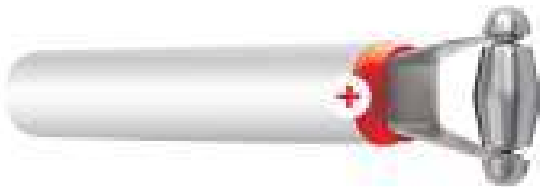

Egy pozitív görgős elektróda

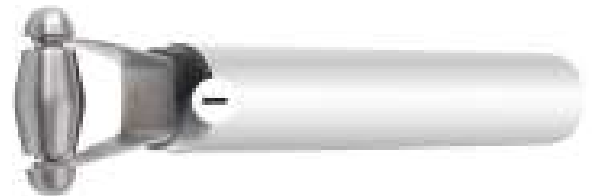


Egy negatív görgős elektróda

Stimulálás




Két „gömb” stimuláló elektróda

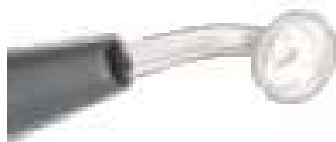

Egy magas frekvenciás üveg elektróda


ÚJ

KORSZERÜSÍTETT FELSZERELÉSŰ HYDRADERM LIFT KÉSZÜLÉK

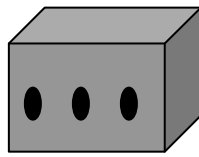


Egy elektronikai adapter

„Kettős Ionizáció”

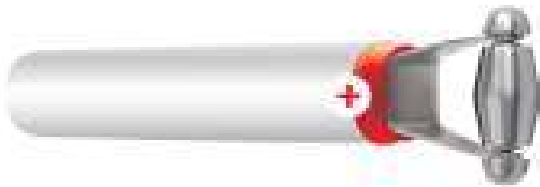

Egy pozitív görgős elektróda

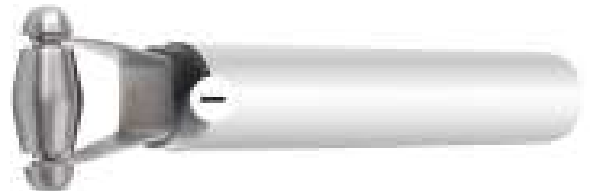

Egy negatív elektróda

Stimulálás



Egy „gömb” stimuláló elektróda

(a másik „gömb” elektróda már része az előző készüléknek)

HYDRADERMIE

„Kettős Ionizáció”

Több nyereség

Rövidebb procedúra

Nagyobb kezelési ár



Még kényelmesebb

A negatív kézi elektróda nem szükséges többé

Új elektródák



Pontos procedúra

Még hatékonyab, de egyszerűbb



Szérum Gél / Szépségápolási Cél



A SZÉRUM GÉLEK BEMUTATÁSA

ÚJ



ARC ÉS NYAK SZÉRUM GÉLEK

150 ml tubus

Adagolófej

SZEM SZÉRUM GÉL

75 ml tubus

Adagolófej

**A TUBUSOK puhábbak
és vékonyabbak a könnyebb
használat érdekében**



HYDRADERMIE és

Hydradermie

Javasolt kezelési ár: 15.800 Ft

Hydradermie Age Logic

Javasolt kezelési ár: 17.800 Ft

AGE LOGIC

	T. sz.		ml	ml / kezelés	kezelés / termék
Démaquillant Exfoliant	453 800	pumpás flakon	500	10	50
Arckezelő zselék + Nyak és Dekoltázs Zselé + Szemkörnyékápoló Zselé	453 - 453 900	tubus	150 75	10 2	15 37
Oxigénant Emulsion OZ2	453 880	tubus	150	10	15
Sérum Lifting Yeux Sérum Longue Vie Cou Buste	453 920 453 930	8 x 3ml ampulla		¼ ampulla ½ ampulla	24 16
Modellant Crème Massage	453 890	pumpás flakon	500	10	50

GUINOT
INSTITUTE • PARIS

TRAINING CENTRE



HYDRADERMIE LIFT

Hydradermie Lift

Javasolt kezelési ár: 19.800 Ft

	T. sz.		ml	ml / kezelés	kezelés / termék
Démaquillant Exfoliant	453 800	pumpás flakon	500	10	50
Arckezelő zselék Sérum Gel Age Logic	... 453 870	tubus tubus	150 75	20 5	7 15
Sérum Lifting Yeux Sérum Longue Vie Cou	453 920 453 930	8 x 3ml ampulla		¼ ampulla ½ ampulla	24 16
Modellant Crème Massage	453 890	tubus	500	10	50

GUINOT
INSTITUTE • PARIS

TRAINING CENTRE



HYDRADERMIE LIFT YEUX

Hydradermie Lift Yeux

Javasolt kezelési ár: 9.800 Ft

	T. sz.		ml	ml / kezelés	kezelés / termék
Eau Démaquillant Parfait	440 172	flakon	500	10	50
Démaquillant Exfoliant	453 800	flakon	500	10	50
Sérum Gel Antirides Yeux	453 900	tubus	75	5	15
Sérum Lifting Yeux	453 920	8 x 3ml ampulla		¼ ampulla	24

GUINOT
INSTITUT • PARIS

TRAINING CENTRE

(új) TÁPLÁLÓ SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Nutrition

HATÓANYAGOK		HATÁS	TÖLTÉS
F Vitamin	ETHYL LINOLEATE ETHYL LINOLENATE ETHYL OLEATE	Újraépítő	-
Karitol	Shea vaj olaj	Tápláló	-
Nyomelemek	Magnesium Réz Cink	Sejt stimuláló	+
Purasal SPF 60 (nincs köze a fényvédelemhez)	Sodium lactate	Hidratáló	-
Pro-ceramides	Oleic sav Linoleic sav	Újraépítő Vízmegekötő	-

HIDRATÁLÓ SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Hydratant

HATÓANYAGOK		HATÁS	TÖLTÉS
Hydrocyte Komplex (új komponens)	Betaine	Hidratáló	+
	Sodium Hyaluronate		-
Hydra Structurine	Phosphoryl Choline Polymer	Hidratáló és véd a káros behatások ellen	+
Nyomelemek	Magnesium Réz Cink	Sejt stimuláló	+
Purasal SPF 60	Sodium lactate	Hidratáló	+

RÁNCTALANÍTÓ SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Anti-Rides

HATÓANYAGOK		HATÁS	TÖLTÉS
EL biopeptidek (új komponens)	Betaine	Feszesítő, ránctalanító, újraépítő, kollagén termelést serkentő	-
	Palmitoyl oligopeptides		
CL biopeptidek (új)	Palmitoyl oligopeptides	Feszesítő, ránctalanító, újraépítő	-
Purasal SPF 60	Sodium lactate	Hidratáló	+ és -
Nutricellular medium	Aminosavak, vitaminok, ATP, RNA, AMP, etc.	Sejt megújító	+ és -
Nyomelemek	Magnesium Réz	Sejt megújító	+
	Cink		

(új) AGE LOGIC SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Age Logic

HATÓANYAG		HATÁS	TÖLTÉS
Oxycell Iyo	Ásványok Proteinek	Oxygenizál, regenerál	-
Exsy ARL SC2	Prolyl histamine HCL	Szabadgyök megkötő	+
Purasal SPF 60	Sodium lactate	Hidratáló	-
ATP	Disodium adenosine triphosphate	Sejtnöveke dést stimuláló, energizáló	-
Hialuronsav	Hialuronsav	Hidratáló	-
Nutricellular medium	Aminosavak, vitaminok, ATP, RNA, AMP, stb.	Sejtmegújító	+ és -
Stay C50	Sodium ascorbyl phosphate	Szabadgyök megkötő, antioxidáns	-
Ederline (alma magból)	Isoflavonoids, phytosterols	Antioxidáns , ránctalanító	+
Nyomelemek	Magnesium Réz	Sejtsstimuláló	+
	Cink		

TISZTÍTÓ SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Pureté

HATÓANYAG		HATÁS	TÖLTÉS
AC.NET	Oleanoic sav	Faggyúterme- lődést szabályzó	-
LIPACID	Capryloyl glycine	Faggyútermelő- dést szabályzó	+ és -
Nyomelemek	Magnesium Réz Cink	Sejtstimuláló	+
Purasal SPF 60	Sodium lactate	Hidratáló	-
Szalicilsav	Szalicilsav	Fertőtlenítő, radírozó	-

NYUGTATÓ SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Apaisant

HATÓANYAG		HATÁS	TÖLTÉS
Purasal SPF 60	Sodium lactate	Hidratáló	+ és -
Sepicalm	Magnesium aspartate	Nyugtató	+ és -
	Potassium aspartate		
	Sodium cocoyl aminosavak (glycine, alanine, glutamic sav)		
PROTECTOL	Betulinic sav	Nyugtató	-
Arnica kivonat	hyperoside	Draining	-
Nyomelemek	Magnesium Réz Cink	Sejtstimuláló	+

FEHÉRÍTŐ SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Eclair

HATÓANYAG		HATÁS	TÖLTÉS
Purasal SPF 60	Sodium lactate	Hidratáló	-
MELANOXYL	Glycerides of erucic, linoleic és oleic savak	Fehérítő, anti-tyrosinase	
Stay C 50	Sodium ascorbyl foszfát	Fehérítő, szabadgyök megkötő	-

RÁNCTALANÍTÓ SZÉRUM GÉL SZEM KÖRNYÉKÉRE, 75ml

Sérum Gel Antirides Yeux

HATÓANYAG		HATÁS	TÖLTÉS
Nyomelemek	Magnesium Réz Cink	Sejtstimuláló	+
Eye liss	Dipeptide 2 / Palmitoyl tetrapeptide 3 / hesperidin methyl chalcone	Mikrokering ést serkentő / sötét karikák és puffadás ellen	-
Kamilla kivonat	Flavinoids: apigenin, quercetin	Nyugtató	

NYAK ÉS MELLFESZESÍTŐ SZÉRUM GÉL, 150ml

Sérum Gel Cou-Buste Fermeté

HATÓANYAG		HATÁS	TÖLTÉS
Hidrolizált kollagén	Kollagén	Megújító, felpumpáló, tónusosságot fokozó	-
Nyomelemek	Magnesium Réz Cink	Sejtstimulál ó	+
Algisium S	Methylsilanol mannuronate	Újraépítő, anti agening	+
Purasal SPF 60	Sodium lactate	Hidratáló	+
EL biopeptidek	Palmitoyl oligopeptides	Feszésítő, ránctalanító, újraépítő	-
CL biopeptidek	Palmitoyl oligopeptides	Feszésítő, ránctalanító, újraépítő	-

MARKETING



SZALON KOMMUNIKACIO



Ablak poszter



Vendégértesítő

KEZELŐ HELYSÉG KOMMUNIKÁCIÓ



Kezelési display

Elérhető: 2010 november

SZALON KOMMUNIKACIO




Vendégértésítő



**Hydradermie Lift Poster
55 X 100 cm**

Elérhető: 2010 november

OKTATASI ANYAGOK

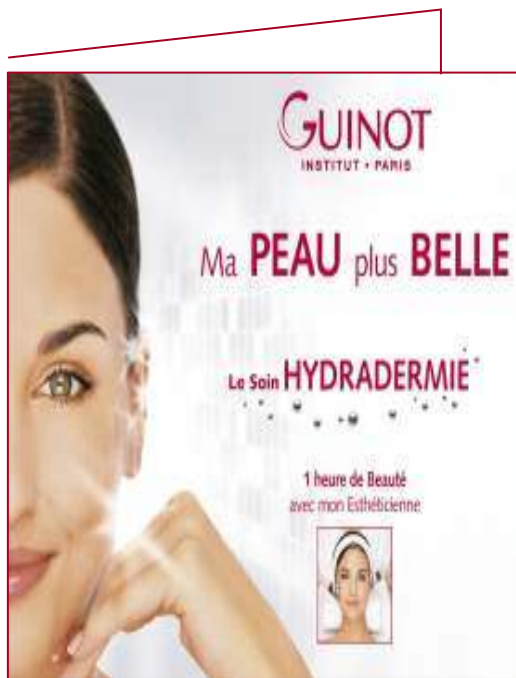

Kezelési útmutató



DVD

Elérhető: 2010 november