



GUINOT
INSTITUT • PARIS

HYDRADERM
cellular  energy

**ANTI-AGEING
INNOVATION**



A NŐK és A SZÉPSÉGÜK

A NŐK és A SZÉPSÉGÜK

A nők minden korosztályban törődnek a bőrük szépségével és fiatalos megjelenésével.

„Nem tudunk küzdeni az idő múlása ellen...”



A bőr öregedését testünk biológiai órája szabályozza és a szennyeződés, a stressz, az UV sugarak stb. gyorsítják fel a folyamatokat.

... De csökkenthetjük a bőrünkön megmutatókozó idő hatásait"

20 éves korban felkészítjük a bőrünket a 30 éves korra.
30 éves korban felkészítjük a bőrünket a 40 éves korra.
40 éves korban felkészítjük a bőrünket az 50 éves korra
és így tovább.



**Soha sem korai, vagy túl késő elkezdni a küzdelmet
a bőr öregedése ellen**

A NŐK és A SZÉPSÉGÜK

Manapság azok a nők, akik fiatalító kezeléseket használnak és különböző esztétikai beavatkozásoknak vetik alá magukat kiemelkedően speciális márkájú bőrápoló termékeket választanak.

Anti-ageing esztétikai gyógykezelés



Botox - Hialuronsav
Bőrradírozás - Dermabrázió



Drága és fájdalmas
Rövid időn belüli eredmények

Anti-ageing bőrápoló termékek



Szabadalmakkal védett összetevők
kiemelkedő ígéretekkel



Drága és kényelmes
Néhány hét után látható eredményekkel

A fenti két megoldás direkt versenyben áll a Szépségszalonokkal.
A kozmetikusoknak ezért kiemelkedő erejű ajánlattal kell visszanyerniük a vendégeket.

Anti-Ageing Arckezelések = megnöveli a szalon és a lakossági termékek eladását.

Az Esztétikai Arckezelés ALTERNATÍVÁJA

Az Esztétikai Gyógykezelés ALTERNATÍVÁJA

A GUINOT egy **forradalmian új gépet** fejlesztett ki az arc fiatalítására.

HYDRADERM
cellular  energy



Azonnali eredmények

Fájdalommentesség

Elviselhető kiadás mindenki számára

Az Esztétikai Gyógykezelés ALTERNATÍVÁJA

Szabadalmaztatott

A szabadalom tartalma:



- Hőenergia és alkalmazása.
- Dinamikus Ionizációs mód és alkalmazása.
- A Hőenergia és a Dinamikus Ionizáció kapcsolata.
- A dizájn és az alkatrészek kompozíciója (alak, kivetítő, elektródák stb.)

Az Esztétikai Gyógykezelés ALTERNATÍVÁJA

2 kiegészítő Fiatalító Kezelés módszer

HYDRADERMIE Fiatalító Kezelés

Láthatóan fiatalítja a **bőrt** a sejtaktivitás stimulálása által

Személyre szabott kezelés a vendég szépségápolási céljaira alapozva


HYDRADERMIE **LIFT**

Láthatóan fiatalítja az **arc vonalait** az izomtónus növelése által

A Hydradermie F fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt

A Hydradermie Fiatalító Kezelés Láthatóan fiatalítja a bőrt

Születéstől kezdve a bőr sejtaktivitása idővel eltűnik.
Sejtjeink energiát veszítenek és lassabban osztódnak.
Az elasztikus rostok szintézise lelassul és megjelennek az öregedés jelei.

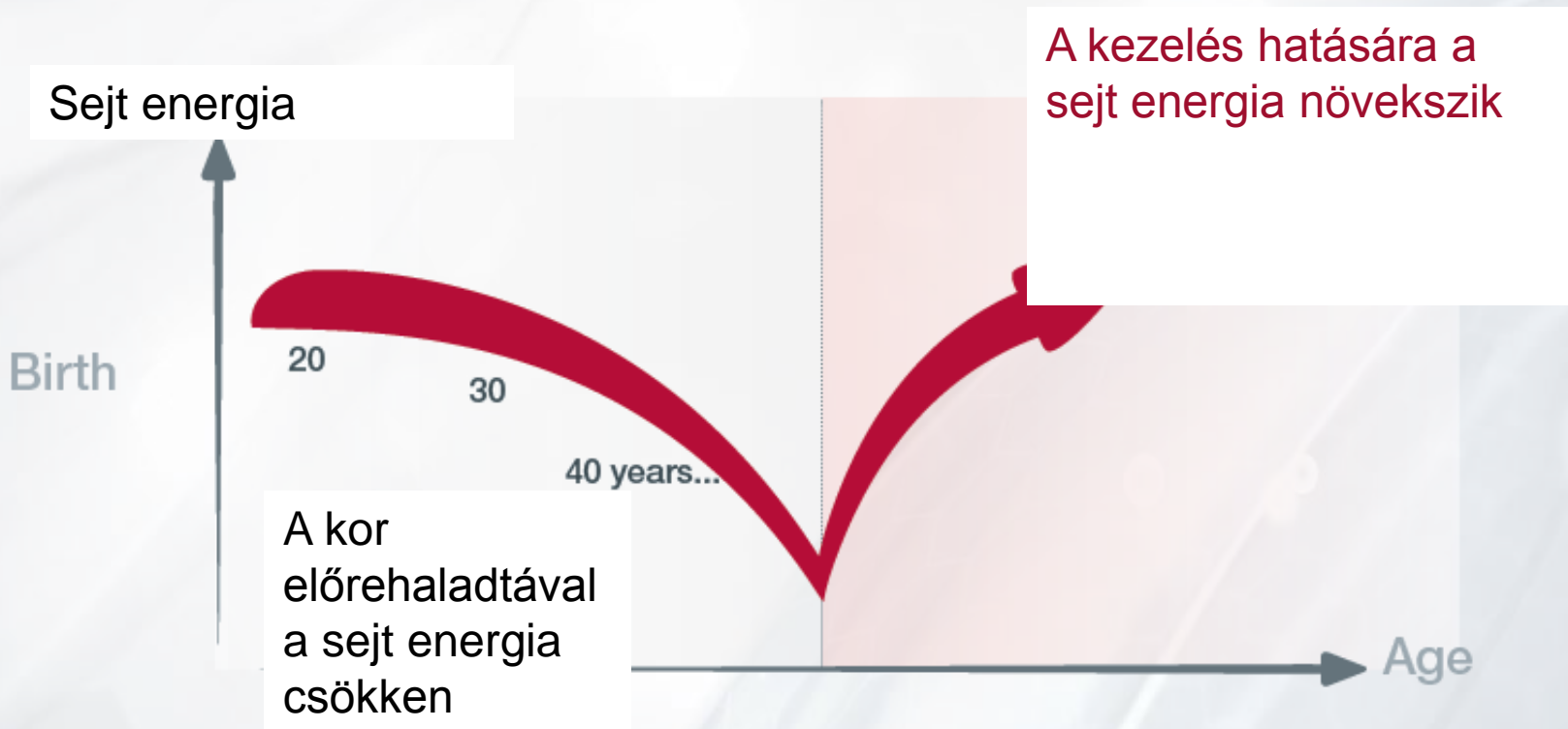

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt

Hogyan tudjuk felélénkíteni a bőr sejtjeinek energiáját?

Molekuláris Energia



+ -
Galvánáram
váltakozó
polaritással:
2 perc.



Hő Energia

A dinamikus ionizáció
magnöveli a **biológiai aktivitást**

A magasabb hőmérséklet
magnöveli a **sejtaktivitást**



Fedezze fel a fiatalos bőr sejtaktivitását

A Hydradermie Fiatalító kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt

A Hydradermie Fiatalító Kezelés elvégzéséhez 8 különféle szérum gélt alkalmazhat a vendég szépségápolási céljainak megfelelően.



Szérum gélek:

- Age logic (Fiatalító)
- Anti-wrinkle (Ránctalanító)
- Longue Vie Soleil (Feszessítő)
- Moisturizing (Hidratáló)
- Nourishing (Tápláló)
- Soothing (Nyugtató)
- Purifying (Tisztító)
- Lightening (Halványító)

150 ml tubus megújult grafikával
Az 1. termék 2016 márciusában lesz elérhető

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt

Kivételes eredmények, amelyek a kezelés végén láthatóak

Szabadalmaztatott Kezelési Módszer

**Amely kivételesen tündöklővé teszi
és fiatalítja az arcbőrt**



A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt

Tudományosan bizonyított hatásosság

A Kezelés anti-ageing aktivitását és a sejtenergiára való hatását emberi bőrszöveteken mérve.

A tesztet a BIO-EC Laboratóriuma végezte el (biológiai kutatási központ, amely kozmetikai bőrápolás tesztelésére specializálódott)

Teszt protokoll

- A protokollt egy 54 éves kaukázusi nő has plasztikája által eltávolított bőrön végezték.
- Exfoliating Cleanser (Hámlasztó tisztító) alkalmazása. Leöblítés, majd tonik alkalmazása.
- Age Logic Serum Gel alkalmazása, majd az elektródák gyengéd mozgatása a bőrön a **Dinamikus Ionizációs módban**, intenzitás beállítása 5-ös, 10 perces.
- Oxygenating Emulsion OZ2 alkalmazása és ez elektródák gyengéd mozgatása a bőrön **Thermal módban**, intenzitás 5-ös, 5 perces.


A Hydradermie Fiatalító Kezelés Láthatóan fiatalítja a bőrt

Tudományosan bizonyított hatásosság

A sejtenergia növelésében

ELŐTTE


Kezeletlen kontrol minta a D1-n

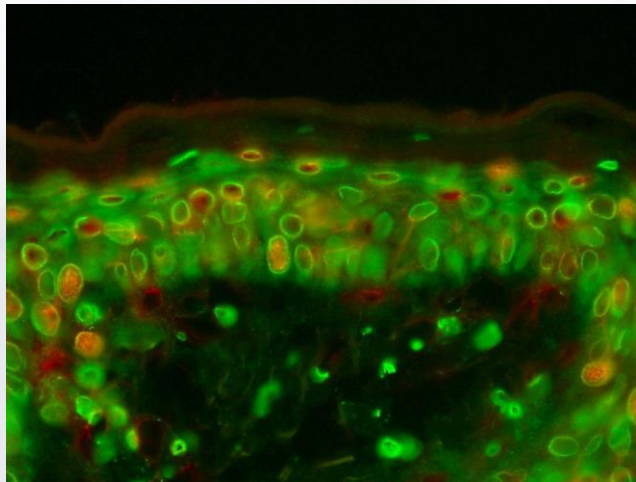

Sejtenergia
kimutatás

**A Hydradermie
Fiatalító Kezelés UTÁN**

Kezelt a D1-n

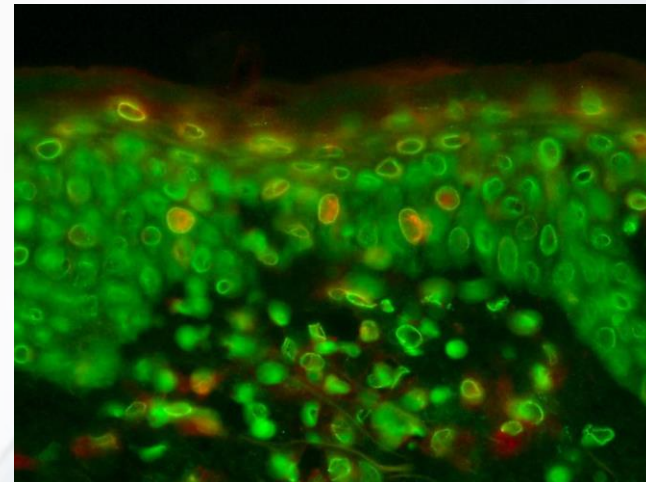

Megnövekedett
sejtenergia
kimutatás

A D1-n végzett mitokondriális akonitáz immunális címkézése
Növeli a mitokondriális akonitáz előfordulását a hámrétegben és az irhában


A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt

Tudományosan bizonyított hatásosság

Sejtregenerációban való növekedés

ELŐTTE

Kezeletlen kontroll minta a D5-ön

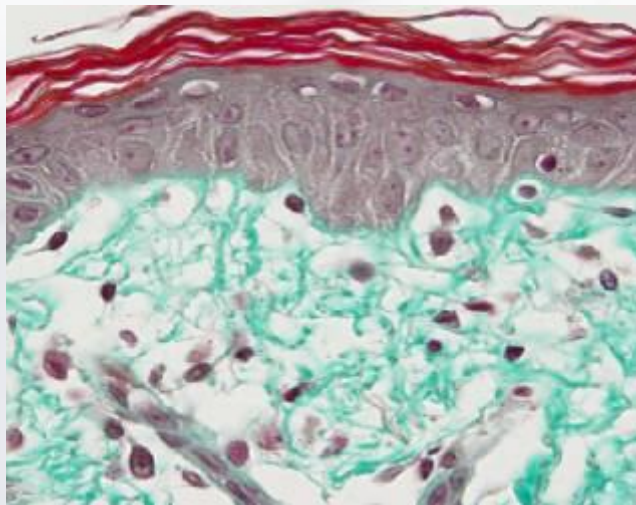


Hámréteg
vastagság

Kollagén
hálózat
tömörsege

A Hydradermie Fiatalító kezelés UTÁN

Kezelés a D5-ön

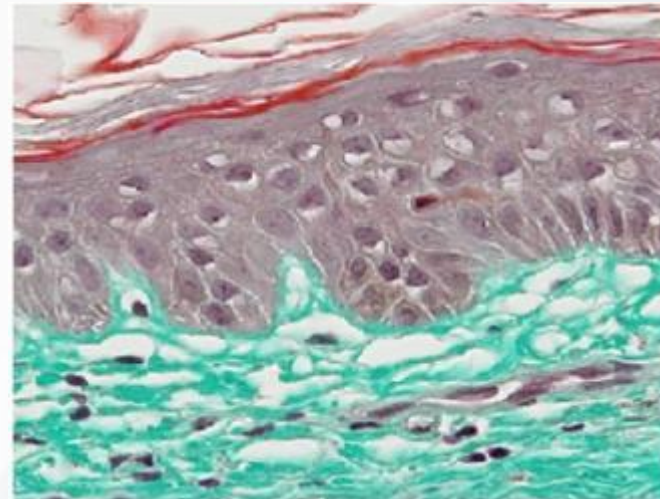

Hámréteg
vastagságának
növekedése

A kollagén
hálózat
tömörségének
növekedése
(zöld színnel)

A hámréteg vastagsága növekszik az új hámsejtek kialakulása által, valamint fejleszti a kollagén hálózat tömörségét a papilláris irhában. .

A Hydradermie Fiatalító Kezelés láthatóan fiatalítja a bőrt



1 órás Kezelés

Bőr előkészítése
8 perc

1. Dinamikus Ionizáció
10 perc

2. Thermal Elektróda
5 perc


Specifikus szérum (opcionális)
2 perc

3. Masszázs
10 perc

A kezelés után: Arc és Szem maszkok
10 perc

A kezelés után: Szérumok és Krém
2 perc

Könnyű smink
3 perc

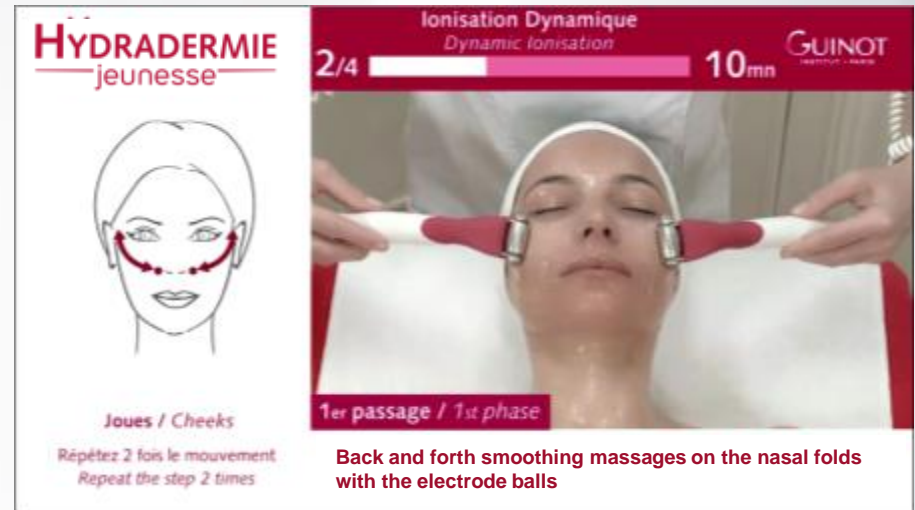


Kétszer mozgassa át az elektródákat a bőrön a kéz váltakozása nélkül

**A Hydradermie Lift Kezelés
láthatóan fiatalítja az arc vonásait**

A Hydradermie Lift Kezelés láthatóan fiatalítja az arc vonásait

Az idő előrehaladtával hajlamosak vagyunk az izmainkat kevésbé használni, melynek következtében a bőr veszít a tónusából és az arc vonalai megereszkednek. A fiatalos test megőrzéséért kifejezetten ajánlott a testmozgás. Mindazonáltal a fiatalos arc megőrzéséért az izmait stimulálni kell az aktivitásuk felélénkítésére és az arc vonalainak megemelésére.

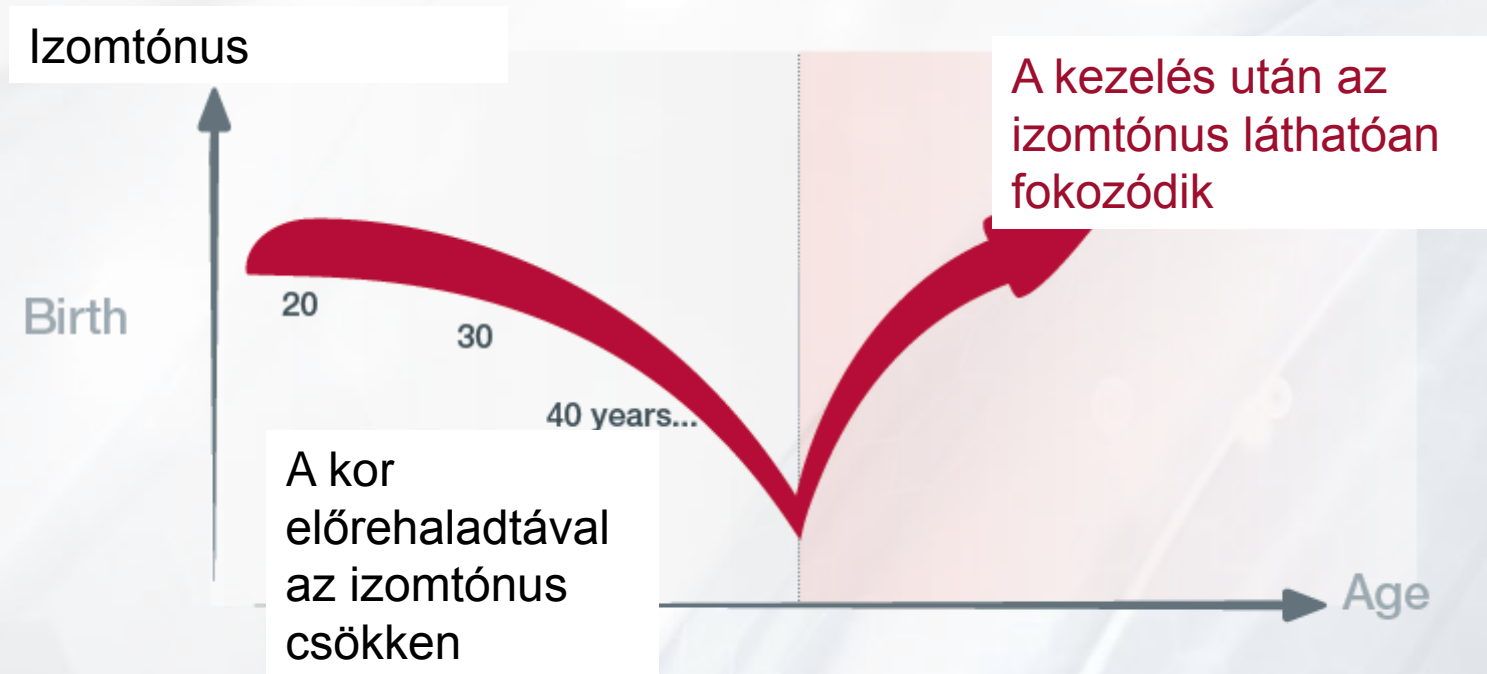

A Hydradermie Lift Kezelés Láthatóan fiatalítja az arc vonalait


Hogyan tudjuk stimulálni az arc izmait?

Anti-ageing szövet méregtelenítés



Méregteleníti a
nyirokrendszert és **kisimítja az
arc vonalait**

Izom Stimuláció

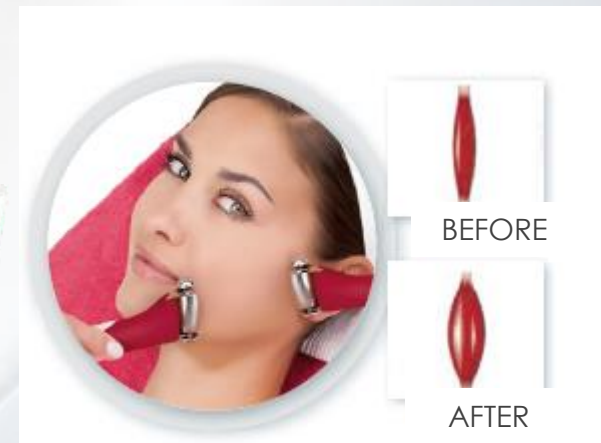

Stimulálja az izom aktivitást
egy **azonnali lifting hatással a bőrön**



**Megnöveli az izom tónusát: „Testépítő” hatás az arcon,
az arc vonalai megemelkednek, a kontúrok újra építettek lesznek.**

A Hydradermie Lift Kezelés Treatment láthatóan fiatalítja az arc vonalait

Izomstimulálás excitomotor árammal

▪ Egy olyan alacsony frekvenciájú áram tonizáló hatással, amely stimulálja az izomrostokat. Összehasonlítva a közepes frekvenciával (kevesebb tonizáló hatás) és a magas frekvenciával (ez az áram nem célozza meg az izmokat).


▪ **Egyszerű áram még nagyobb hatásossággal és komfort érzettel**

Ez az alacsony frekvenciájú áram:

- **változó áram**, amely megelőzi azt, hogy az izmok hozzászokjanak, illetve

Klasszikus áram

Guinot változó áram

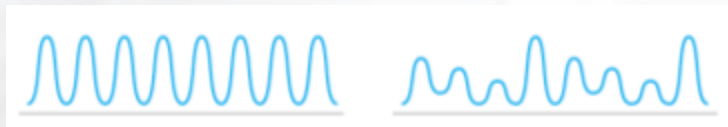

Szabályozott áram változó intenzitással, amely fokozatosan emelkedő és süllyedő sebességű minden egy és tíz másodperc között a nagyobb hatásosság kedvéért

- **szabályozott** annak érdekében, hogy a biztosítsa a vendég komfort érzetét stimuláló fázis alatt

Klasszikus áram

Kellemetlen

Guinot szabályozott áram



A szabályzás eltűnteti a stimuláló intenzitás egy részét a nagyobb komfort érzet érdekében

EXKLUZÍV
GUINOT

▪ Ahogy az izomstimuláció a használt áram intenzitásától és a bőr vezető képességétől (hidratáltsági szint) függ, úgy fontos, hogy megfelelő mennyiségű Szérum Gél alkalmazunk, amelyet a bőr magába fogad.

A Hydrademie Lift Kezelés láthatóan fiatalítja az arc vonásait

Kivételes eredmények láthatóak a kezelés végén



Kezelés metódus

amely az izmok mozgatásával
megemeli az arc vonalait

ezzel fiatalítva az arcot

A Hydradermie Lift Kezelés láthatóan fiatalítja az arc vonásait



1 órás Kezelés

Bőr előkészítése
8 perc

1. Anti-ageing szövet méregtelenítés
10 perc

2. Izom Stimuláció
15 minutes

3. Masszázs
10 perc


Kezelés után: Arc és Szemmaszk
5 perc

Kezelés után: Szérumok és Krém
2 perc

Könnyű smink
3 perc



5-ször ismételjen minden lépést

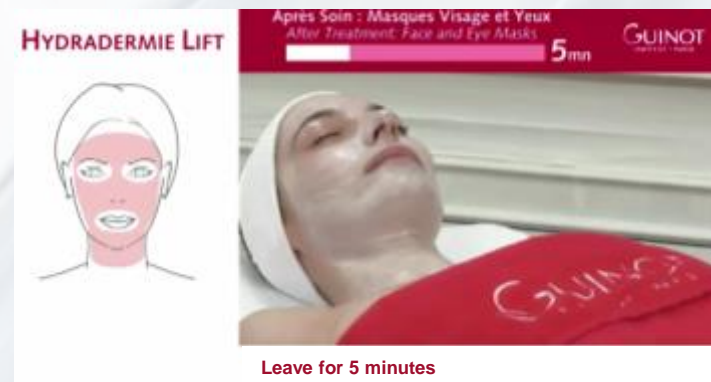

10 percig hagyja fent a Maszkot

HYDRADERM
cellular  energy

eszköz

Egy intelligens eszköz

HYDRADERM
cellular  energy



Szépségszalon
Irányító

Wi-fi kapcsolt
eszköz

Szépségszalon Irányító

Vezeti a kozmetikust, miközben a Kezelést végzi
Garantálja, hogy a Kezelések tökéletesek a kezelési idő megfelelő.



Valós időben végzett videók

- Fejleszti a kozmetikus **szakértelmét**, valamint **személyes irányítóként** segíti a munkáját.
- A vendégeknek egy **következetesen kiemelkedő minőségű szolgáltatást** nyújt.
- **Optimális profitot** teremt, mivel a kezelésre fordított idő kötött és figyelembe kell venni.

Szépségszalon Irányító

Minden GUINOT Kezelés valós idejű videója

ARCÁPOLÁSI Kezelések



- Hydraclean
- Hydradermie Jeunesse
- Hydradermie Lift
- Aromatic
- Beauté Neuve
- Liftosome
- Age Summum
- Eye Logic

TESTÁPOLÁSI Kezelések



- TechniSPA®
- Aromatic testkontúr kezelés
- Aromatic test puhító kezelés
- Techni-karcsúsító (kivitelezés)
- Techni-feszesítés (kivitelezés)

SZŐRELTÁVOLÍTÁSI Technikák



- ÉPIL CONFORT
- STICK'HAIR®

Szépségszalon Irányító

Minden GUINOT Kezelés valós idejű videója

Elérhető nyelvek*:



FR



EN



ES



DE



IT



RU



NL



JA



ZH



ARAB



→ Fordítás

Váltogathatja a nyelvet a gépen azáltal, hogy módosítja a paramétereket.



* További nyelveket is hozzá lehet adni (Területi Manager által)

Összekapcsolt eszköz

BEÉPÍTETT WIFI KAPCSOLAT

Távirányítású frissítés, Távirányítású szerviz, szolgálat, Multi-screen funkció

▪FRISSÍTÉS:


1. kattints a beállítások ikonra, 2. hosszan érintsd meg a bal felső sarkot 3. Válaszd ki és érintsd meg a wifi jelet 4. Csatlakozz a hálózathoz 5. várj 1 percet majd kapcsold ki be a gépet 6. A főképernyőn megjelenik egy lefelé mutató háromszög, érintsd meg és várd meg amíg letölti az új kezeléseket



A gép exkluzív funkciói

Láthatóan fiatalítja a bőrt és az arc vonalait a 3 egyedülálló funkciónak köszönhetően

Hydradermie Fiatalító Kezelés

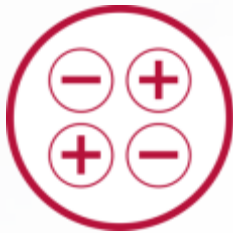

Dinamikus Ionizáció



Hőhatás



Hydradermie Lift Kezelés



Lifting Stimuláló



- Alapértelmezett beállítás: Az intenzitás szintje minden funkciónál **előre beállított** ezt a kezelés során lehet állítani a vendég kívánsága alapján.
- A melegítő elektródák **automatikusan felmelegednek a fázis elején.**

Az Elektródák

Göngös elektródák



**Ergonomikus elektródák
méregtelenítéshez és az ionizációs
funkciókhoz**

Melegítő elektróda



**Ergonomikus elektróda erősség
fényjelzővel**

Legfőbb érvek

Legfőbb érvek

Az innovatív Kezelési módszerek ajánlása



Valódi alternatívája az **esztétikai arcfiatalításnak**, amely azonnali hatást fejt ki a bőr öregedése ellen.

Egy olyan **szabadalmaztatott** gépem van, amellyel más cégek nem rendelkeznek és a Kezelés végére **látható eredményeket** lehet elérni.

A Hydradermie Fiatalító kezelés **láthatóan fiatalítja a BŐRT** a sejtaktivitás stimulálása által.

A Hydradermie Fiatalító Kezelés egy **személyre szabott** Kezelés, amely láthatóan **fiatalítja** a bőrt a **kitűzött Szépségápolási Célok** figyelembe vétele által.

A Hydradermie Lift láthatóan **fiatalítja az ARC VONÁSAIT** az anti ageing **méregtelenítés** és az **izomtónus élénkítése** által

Az orvosok megbénítják az izmokat, míg a kozmetikusok **stimulálják** azokat.

3 alternatív Kezelés az Esztétikai Gyógykezelésre

**ANTI-AGEING
DERMABRASION**

**ATTENUATES
WRINKLES**
By smoothing the skin's surface

Age
Summum
Kezelés

- Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ezzel utat biztosítva az **új sejtek** számára
- Elősegíti a **kiemelt technológiával** készített aktív hatóanyagok felszívódását a bőrbe

**CELL
REGENERATION**

**REJUVENATES*
THE SKIN**
By stimulating cellular activity

HYDRADERMIE
— fiatalító —
Kezelés

- **Energiát szállít** az új sejtek számára
- Visszaállítja a fiatalos bőr **sejtaktivitást**

**INTENSE
LIFTING ACTION**

**LIFTS FACIAL
FEATURES**
Using muscle stimulation

HYDRADERMIE**LIFT**
Kezelés

- Erősebb **tónust** eredményez az arcnak
- **Kisimítja** az arc vonásait

Mindegyik kezelés előírható **3 alkalmas intenzív kezelésként**, vagy **egy intenzív globális fiatalító kezelésként**

(1 Age Summum + 1 Hydradermie Fiatalító +1 Hydradermie Lift)

Javasolt ár Kezelésenként - Franciaország


	Hydraderm Kettős Ionizációs Eszköz	
	Mini	Maxi
Hydradermie	60 €	70 €
Hydradermie Lift	85 €	95 €
Hydradermie Age Logic	75 €	95 €

Eye Logic	50 €	60 €
------------------	-------------	-------------

	Hydraderm Cellular Energy Eszköz	
	Mini	Maxi
Hydradermie Fiatalító	65 €	75 €
Hydradermie Lift	85 €	100 €
Hydradermie Age Logic	75 €	100 €

Eye Logic	50 €	60 €
------------------	-------------	-------------


Eladás fellendítése a Guinot eladási képviselőknek

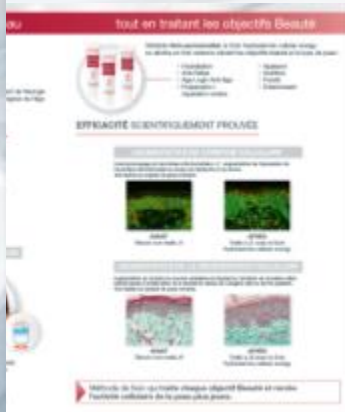

Eladási Anyagok (A4 -es formátumban)

- Kezelés leírás
- 2 Kezelés Bemutató
- Eszköz bemutató

Helyileg
kidolgozott

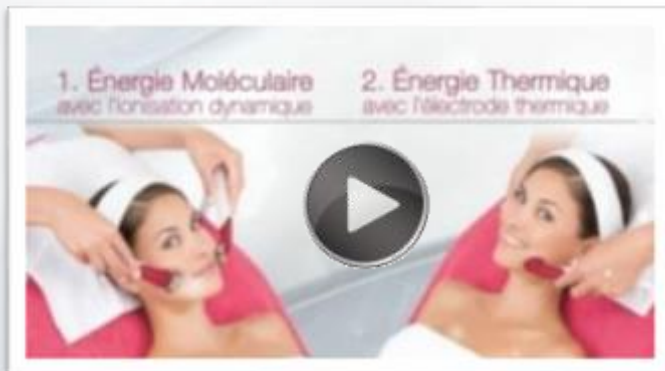

Kezelés videó (2 perc)

FRANCIA / ANGOL

- Hydraderm Cellular Energy kezelés bemutató
- Eszköz bemutató

Kozmetikusok oktatása

Bemutató film (8 perc)

FRANCIA / ANGOL / SPANYOL / NÉMET



- Tartalom (a piac és a nők szükségletei, elvárásai)
- Eladási érvek 2 Kezelési módszerre (kezelés lépések)
- Eladási érvek a gépre (irányítás)

Kozmetikusok számára



e-Training

FRANCIA/ ANGOL

- Valós időben végzett kezelés film
- Szalon kezelése és termékek ismertetése
- Szépségszalon Kezelések Protokoll



Gyakorlati Útmutató

FRANCIA / ANGOL

A Hydradermie Fiatalító /Hydradermie Lift/
Szem környéki kezelése protokoll

Helyileg
kidolgozott

Szépségszalonok Kirakata



Kirakat plakát



Új Kezelői helységeb való terméktartó állvány



Legújabb háttér plakát a meglévő terméktartó állványra



Levél (x50)

A kezelő helység kinézete



Súly : 6700 g

KÖZPONTI MEGRENDELÉS:

Tel. / Fax: (1) 329-4298, (1) 329-4060

megrendeles@st-beauty.co

Viber, WhatsUp: 30-484-5939

Messenger: ST Beauty Szakmai

Webáruház

www.st-beauty-shop.co

KAPCSOLAT ÚJ ÉRDEKLŐDŐ PARTNEREK:

Bánhegyi Andor, andorbanhegyi@st-beauty.co

SZALON KONZULENSEK:

* Budapest, Pest megye a Dunától NY-ra, Fejér, Komárom, Győr-Sopron,
Veszprém és Vas megyék: Ferenczi Kata 0670 607 0942

* Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyék: HORVÁTH ILDIKÓ, 06-20-410-4374,
quinot78@gmail.com

* Csepel sziget, Pest megye a Dunától K-re, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Csongrád,
Békés, Hajdu-Bihar megyék: ZENTAI GÁBOR, 06 30 822 4057,
zentai.gabor73@gmail.com

* Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj, Szabolcs-Szatmár megyék: TÓTH ERIKA, 06-30 221
7707, erikatoth77@gmail.com

www.quinot.com Facebook: Guinot Magyarország

Kérd felvételedet facebook csoportunkba is!